



## Comunidad GLUCUBERS

¿Qué es la comunidad GLUCUBERS?

### ¿EN QUÉ CONSISTE?

El objetivo de la comunidad GLUCUBERS es ir evolucionando e incrementando la exactitud de nuestro dispositivo mediante la comparación de mediciones realizadas con otros dispositivos. Queremos brindar a nuestros usuarios la oportunidad de participar en la evolución continua de nuestros productos.

Para ello, nos gustaría recoger mediciones contrastadas de nuestro dispositivo GLUCUBE junto a las de un glucómetro capilar que nos ayuden a incrementar la exactitud de GLUCUBE.

### DURACIÓN Y DEVOLUCIÓN

El programa tiene una duración de **30 días** a partir de la fecha en que el usuario recibe el dispositivo GLUCUBE y el glucómetro capilar. Durante este período, los participantes deberán realizar **50 mediciones** contrastadas y contribuir activamente en la comunidad.

Cuando se hayan recogido las mediciones, gestionaremos la devolución del glucómetro capilar. Esta participación en la comunidad GLUCUBERS es muy importante para la evolución de nuestro dispositivo, por lo que deberemos constatar la validez de las medidas.

### REQUISITOS PARA PARTICIPAR

**1. Ser propietario de nuestro dispositivo:** Solo aquellos que hayan adquirido nuestro dispositivo podrán participar en el programa. Esto nos permitirá comparar las mediciones realizadas con nuestro dispositivo con las mediciones de otros dispositivos.

**2. Aceptar las condiciones de la comunidad:** Para participar, los usuarios deben aceptar las condiciones que se establecen más adelante en este documento. Estas se aceptan al comprar el producto GLUCUBE utilizando el código de promoción de la comunidad GLUCUBERS.

# ¿Cómo realizar las mediciones contrastadas de glucosa?

Una **medida contrastada** consiste en una medida con el dispositivo GLUCUBE enlazada a una medida obtenida con el glucómetro capilar. Para que estas medidas sean válidas deben seguir ciertas condiciones.

## Medición contrastada válida

Para que una medición contrastada se considere válida, debe cumplir con los siguientes criterios:

- La medición debe realizarse utilizando el dispositivo GLUCUBE y añadir el valor de glucosa obtenido del glucómetro capilar que proporcionamos. En este manual se explica cómo realizar la medición de glucosa capilar y enlazarla con la medición GLUCUBE.
- Las mediciones contrastadas deben recogerse con una **separación de al menos 4 horas entre ellas**. Si se realizan varias mediciones contrastadas en un periodo inferior a 4 horas, solo se contabilizará la primera de ellas que cumpla con los requisitos de validez.

En la aplicación GLUCUBE APP, encontrará en el menú lateral un apartado para llevar el seguimiento de las medidas contrastadas válidas. Todas las medidas quedarán registradas en la APP, no es necesario apuntar los pares de medidas en otro ningún otro medio.

En el periodo de 30 días desde que se recibió los dispositivos, cada participante debe realizar:

## 50 mediciones contrastadas válidas




Al unirse a la comunidad GLUCUBERS, le enviaremos un glucómetro capilar junto a las tiras reactivas necesarias para recoger las medidas. Este glucómetro lo recogeremos al finalizar el plazo.



Durante este plazo, únicamente se registrarán como medida contrastada válida las medidas en las que se añada un valor capilar y cumpla con los criterios para su validez mencionados anteriormente. No influirá en el uso habitual del dispositivo GLUCUBE.

## 1. Medición con el dispositivo GLUCUBE

En primer lugar, deberá realizar una medición GLUCUBE, tal y como se indican en los manuales y en la APP. A continuación, se resume el proceso de la medición que podrá seguir en la APP:

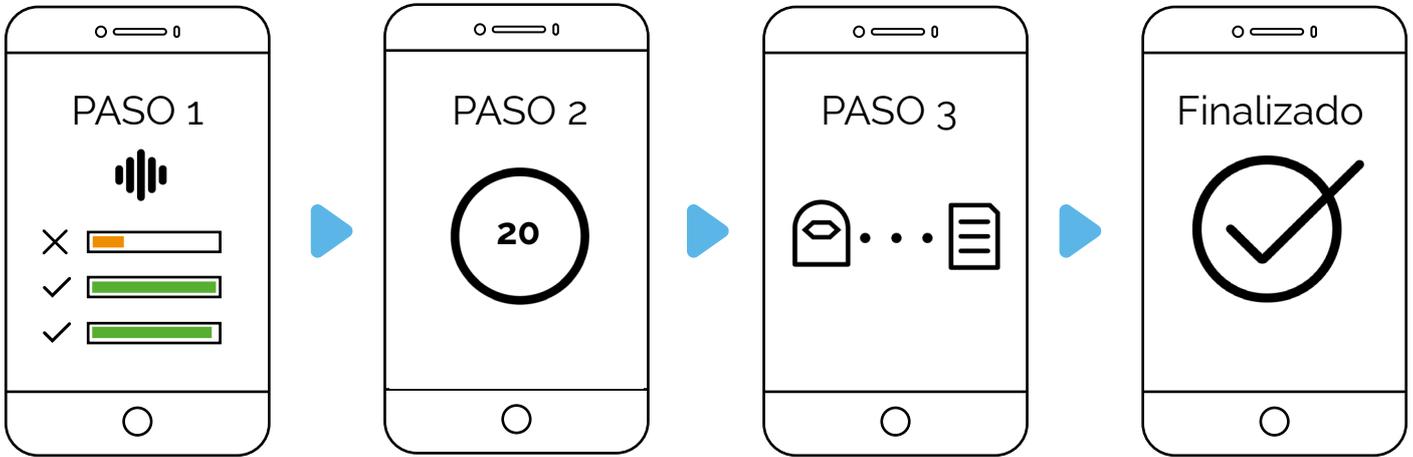

Una vez finalizada la medición GLUCUBE, aparecerá el valor de glucosa. **ANTES DE GUARDAR**, deberá introducir el valor obtenido por el glucómetro capilar, que se explica a continuación.

## 2. Medición con el glucómetro capilar


. A continuación se resume como recoger la medida en la APP. Si tiene alguna duda sobre como utilizarlo, consulte sus instrucciones de uso

**1** Coloca la tira reactiva en el glucómetro.  
Este se encenderá.



**4** Introduce el valor obtenido en la APP GLUCUBE, en el apartado "**Medición Manual**", y pulsa en "**GUARDAR**".

**2** Realiza la punción con la lanceta en la yema del dedo.

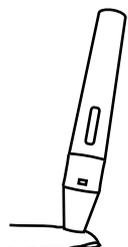

**3** Coloca la sangre en la tira.





# Condiciones de la comunidad GLUCUBERS

Al unirse a la comunidad GLUCUBERS, se compromete a:

- Recopilar **medidas contrastadas válidas**, tal y como se establece en este documento. Al concluir el periodo, el equipo GLUCUBE constatará la validez de las medidas recogidas.
- Completar el objetivo de las **50 medidas contrastadas válidas** dentro de un plazo de **30 días**, desde que se recibió el dispositivo GLUCUBE y el glucómetro capilar.
- Facilitar el contacto y disponibilidad para proceder a la **devolución del glucómetro capilar**.

En caso de que no se cumpla con algunas de las condiciones establecidas, se anularán las ventajas incluidas en la promoción ofertada para la comunidad GLUCUBERS.\*

\*Esta promoción incluye, el descuento en la compra del dispositivo GLUCUBE a 175 euros en lugar de 299 euros y la suscripción gratuita hasta 2024. Tendrá opción de seguir disfrutando de GLUCUBE, completando el importe total del dispositivo, lo que supondrá un pago de 124€.

**Privacidad y protección de datos:** Todos los datos recopilados durante el programa se utilizarán única y exclusivamente con fines de investigación y mejora de nuestros productos. Para más información puede leer nuestra [Política de Privacidad](#).

Esperamos que participar en nuestra comunidad GLUCUBERS sea una experiencia enriquecedora tanto para usted como para nosotros. Su participación nos ayudará a evolucionando e incrementando la exactitud de nuestros productos y brindar mejores soluciones a nuestros clientes. Si tiene alguna pregunta o necesita más información, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en [weare@glucube.com](mailto:weare@glucube.com)

**¡Gracias por ser parte de nuestra comunidad GLUCUBERS!**

